

NP North Parama, Inc.



全自動血圧計

FT-1100
s e r i e s

FT-1100 / FT-1100db



その血圧計、進化型。

全自動血圧計の定番、FTシリーズがさらに進化しました。
タッチスクリーンを搭載し、測定データの多様な表示・分かりやすい操作環境
を実現。測定データの蓄積・管理も可能になり、血圧計がさらに使いやすく、
さらに身近な存在に。

FT-1100シリーズが、皆様にスマートな健康管理をご提供いたします。



触れること。知ること。

ー FT-1100シリーズによる血圧測定で、これだけの生体情報が得られますー

血圧値

脈拍数

血流
パターン

末梢血管
抵抗

動脈の
弾力性

心臓の
負担度

血液
循環量

BMI

脱、パソコン入力。

F T-1 1 0 0 シリーズは、10.4インチのタッチスクリーンを搭載。測定データの多様な表示や、入力作業の簡素化を実現しました。さらにF T-1 1 0 0 d bでは、測定データの保存・蓄積も可能です。新旧の測定データをその場で比較しデータ推移を確認することで、お客様へのより適切なアドバイスが実現します。また、蓄積したデータのバックアップなどのデータ管理機能も充実しました。

さらに手軽に、さらに使いやすく。F T-1 1 0 0 シリーズが追求した新機能です。

信頼性、操作性、表現力

測定は信頼性の高いリパロッチ方式を採用。10.4インチのタッチスクリーン上で分かりやすい操作と豊かな表現を実現しました。

様々な場面で

KSG(コロトコフサウンドグラフ)によって、血圧値だけでは分からなかった血流状態の傾向が一目で分かります。そのほかにも動脈の弾力性や心臓の負担度など、さまざまな生体情報を得ることができるので、薬局での健康相談を始め、スポーツジムなど、さまざまな場面でお使いいただけます。

待受画面のカスタマイズ

「待受画面表示」の「画像取込機能」を活用すれば、特売情報や季節の健康情報、おすすめ商品のP Rなどをスクリーンに表示することができます。

登録顧客を一覧印刷 (F T-1 1 0 0 d bのみ)


登録顧客の一覧表をA 4サイズでプリントアウト。より簡単に、分かりやすい顧客整理・データ管理をご提供いたします。

登録番号	登録者名	生年月日	性別	登録日	最新測定日
0000123456	アイカワタケシ	1976/09/02	男	2004/05/10	2004/06/15
0000122222	アイダタロウ	1976/05/10	男	2004/05/10	2004/06/11
0000123245	イシダコウヘイ	1940/06/08	男	2004/05/16	2004/06/20
0000152168	イノウエウジ	1977/10/23	男	2004/05/16	2004/06/11
0000123497	イナモトコウジ	1975/06/09	男	2004/05/03	2004/06/03
0000125478	ウエダゴウ	1977/06/29	男	2004/05/05	2004/06/20
0000249695	ウエムラユミコ	1940/11/12	女	2004/05/08	2004/06/15
0000251346	ウエムラユキコ	1954/12/25	女	2004/05/22	2004/06/11
0000246812	キモトコウジ	1956/02/25	男	2004/05/22	2004/05/22
0000286513	キシワダユウ	1945/08/07	男	2004/05/26	2004/05/26
0000275613	コムラジュン	1955/12/24	男	2004/05/03	2004/06/11
0000345816	コドウサチエ	1960/08/12	女	2004/05/14	2004/05/14
0000361524	サトウハナコ	1954/09/24	女	2004/05/14	2004/06/20
0000391245	サトウジロウ	1972/05/02	男	2004/05/20	2004/06/25
		1973/04/25	女	2004/05/17	2004/06/08


測定結果A 4出力

専用のプリンタに出力することで、測定結果の詳細を見やすいA 4サイズのカラープリントでお客様にお渡しできます。


■ 詳細

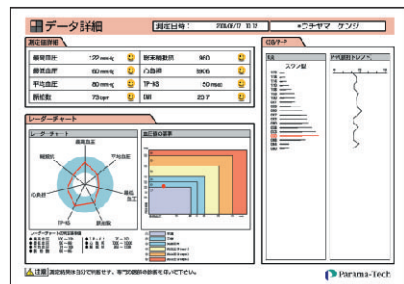


■ 比較 (F T-1 1 0 0 d bのみ)

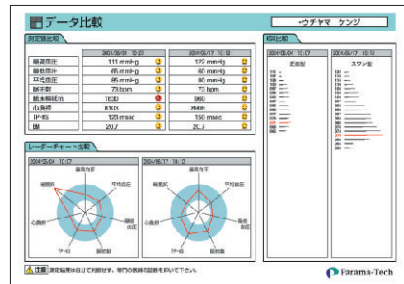

■ 推移 (F T-1 1 0 0 d bのみ)

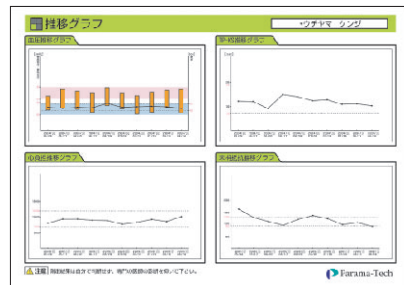

■ 一覧 (F T-1 1 0 0 d bのみ)

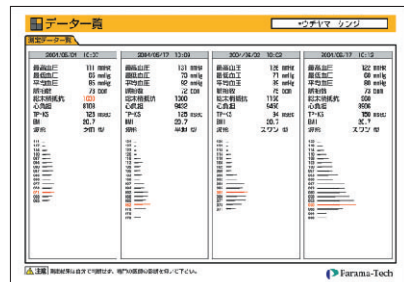

多彩な画面表示、分かりやすいインターフェイス


測定結果画面



測定データ比較画面 (FT-1100dbのみ)



測定データ推移画面 (FT-1100dbのみ)

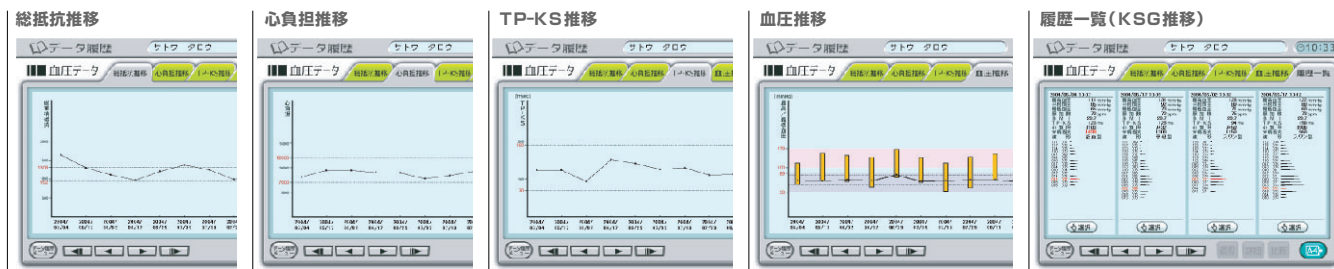


測定データ詳細画面 (FT-1100dbのみ)



血流パターン ※ KSGの血流パターンの説明は血流状態の傾向を示すものであり、診断ではありません。

血行不良タイプ			正常	血行過剰タイプ		不整型
乏血型	平坦型	b型	スワン型	双峰型	台形型	不整型
低血圧 貧血 体力低下 神経性食欲不振	肥満 体力低下 老人	体力低下 過労	正常	動揺 高血圧・ 心疾患に注意	高血圧・ 脳卒中に注意	心疾患・不整脈 体動・会話

実測データ

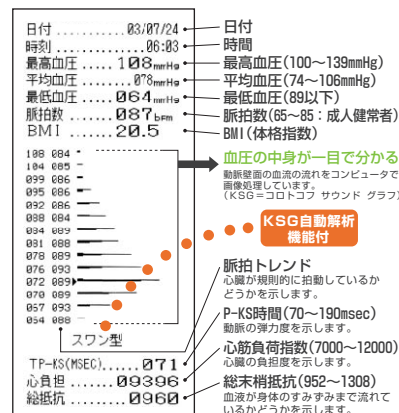

設置例

※体脂肪計BF-101との組合せの場合

- ☐ 架台(別売)
- ☐ いす(別売)
- ☐ スライド天板(別売)



主要機能比較表	弊社従来機種 (FT-101)	FT-1100	FT-1100db
全自動測定	○	○	○
音声ガイダンス	○	○	○
画面ダイアログ	—	○	○
操作方法	操作ボタン	タッチスクリーン	タッチスクリーン
測定方式	リバロッチ方式		
データ表示	LED表示	LCD表示	
データ詳細	—	○	○
データ比較	—	—	○
データー一覧	—	—	○
データ推移グラフ	—	—	○
データ保存	—	—	○
待受画像表示(画像取込み)	—	○	○
本体プリント(血圧測定データ)	○	○	○
データテーブルの印字	○	○	○
A4プリント	—	○	○
データ詳細	—	○	○
データ比較	—	—	○
データー一覧	—	—	○
データ推移グラフ	—	—	○
登録者一覧印刷	—	—	○
保存データのバックアップ	—	—	○
新健康管理システムへのデータ出力	○	○	—
新健康管理システムデータの取込み	—	—	○※

※同梱の専用ツールで新健康管理システムデータをFT-1100db用に変換して取り込みます。

仕 様 FT-1100/FT-1100db	
測定方式	リバロッチ方式
圧力表示範囲	0～270mmHg
圧力検出	半導体圧力センサー
最小処理数	30脈拍/分
最大処理数	180脈拍/分
表示方式	タッチスクリーン機能付きLCDカラー液晶画面
記録方式	オートカッター付きサーマルラインプリンター
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	60VA
重量	11.7Kg±5%以内
寸法	464×280×324mm
医療用具承認番号	20500BZZ00191000
 安全に関するご注意	ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※本製品の仕様・デザイン及びオプション品は、改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品の色調は印刷の関係上、実物とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



お問い合わせ・ご用命は・・・

NP North Parama, Inc.

〒104-0033 東京都中央区新川2丁目13-11 内田ビル2階 TEL (03) 6228-3110 (代表) FAX (03) -3523-0517

Parama-Tech

本 社 〒812-0068 福岡市東区社領2-19-8

ノースパラマ株式会社
<http://www.north-parama.com>

株式会社 パラマ・テック
<http://www.parama-tech.com/>

TEL(092)623-0813 FAX(092)623-0814